

¿Qué contiene el kit MIC-KEY* G de Halyard?

Juego de extensión para alimentación continua MIC-KEY* G de 30,5 cm (12 pulgadas) Para alimentación diaria continua o con bomba, administración de medicamentos y ventilación (se reemplaza cada algunas semanas).

Juego de extensión para alimentación por bolo MIC-KEY* G de 30,5 cm (12 pulgadas) Para alimentación diaria por bolo y para ventilación (se reemplaza cada algunas semanas).



Guía de uso y cuidado del sistema MIC-KEY* G para pacientes

Este recurso para usuarios de sondas de alimentación enteral y sus cuidadores trata sobre lo siguiente:

1) la alimentación enteral con una sonda de bajo perfil, 2) la limpieza y el cuidado de la sonda y 3) dónde encontrar más apoyo y ayuda

Jeringa con punta de catéter de 35 ml Para alimentación por bolo y para ventilación, cebado y lavado de juegos de extensión.

Jeringa Luer Slip de 6 ml Para llenar y vaciar el globo de la sonda con agua estéril o destilada.

Nota: El dispositivo de medición del estoma NO ESTÁ INCLUIDO en el kit.

Para obtener más información, visite:

www.halyardhealth.com

Llame al 1-844-HALYARD (1-844-425-9273) en los Estados Unidos y Canadá.

Si desea obtener más información, lea la guía de uso y cuidado para pacientes del sistema de sonda de alimentación MIC-KEY* G, mire el video sobre cómo es vivir con la sonda MIC-KEY* en www.mic-key.com, o consulte con su profesional médico.

Síganos en www.mic-key.com/facebook. Allí podrá chatear con nosotros y con otros usuarios de la sonda de alimentación de la comunidad y aprender consejos útiles para un buen uso de la sonda de alimentación.

La sonda de alimentación MIC-KEY* G de Halyard* está indicada para pacientes que necesitan alimentación a largo plazo. Todos los dispositivos médicos conllevan riesgos inherentes; consulte la documentación del producto para conocer las indicaciones, precauciones, advertencias y contraindicaciones. Comuníquese con nosotros llamándonos al número que aparece a continuación o visite nuestro sitio web para obtener más información.

Consejos para un buen uso de la sonda de alimentación

- Para evitar que el globo estalle, use la sonda de alimentación MIC-KEY* G como se indica en las instrucciones de uso.
- Para evitar cualquier daño, use siempre el equipo correcto. Utilice solo los juegos de extensión que le indique un profesional médico. Use las jeringas únicamente para el propósito previsto.
- Reemplace los juegos de extensión de acuerdo con las instrucciones de uso.
- Llene el globo únicamente con agua estéril o destilada.
- Un profesional médico usará un dispositivo de medición del estoma y luego determinará y recomendará la longitud adecuada de la sonda. Si surge algún problema con la sonda o el estoma, o si hay un aumento o pérdida de peso considerable, comuníquese con un profesional médico. Es posible que sea necesario medir el estoma nuevamente.
- La base externa de la sonda de alimentación debe quedar apenas por encima de la superficie de la piel. Se considera que un buen calce es de 1 mm a 2 mm por encima de la piel, aproximadamente del espesor de una moneda pequeña. Si la base externa queda colocada demasiado baja o alta, comuníquese con su profesional médico para ver si es necesario que se le realice una nueva medición.
- Consulte en el interior de este folleto el volumen de llenado correspondiente a su globo, el cual variará según el tamaño de la sonda.
- Use únicamente lubricante soluble en agua.
- La sonda de alimentación MIC-KEY* G tiene una válvula antirreflujo ubicada en la parte superior del orificio de alimentación. Cuando se conecta el juego de extensión, esta válvula se abre para permitir la alimentación. Es importante mantener limpios el orificio de alimentación y la válvula antirreflujo lavándolos correctamente.
- Para evitar que la válvula se dañe, no introduzca medicamentos ni fórmula alimenticia directamente en la válvula del orificio de alimentación.



GUÍA DE INICIO RÁPIDA DE LA SONDA DE ALIMENTACIÓN MIC-KEY* G



ALIMENTACIÓN ENTERAL...

EN APENAS 1, 2, 3 PASOS

1

LAVE EL JUEGO DE EXTENSIÓN MIC-KEY* G con agua.



2

INTRODUZCA EL JUEGO DE EXTENSIÓN MIC-KEY* G en el orificio de alimentación MIC-KEY* G haciendo que coincidan las líneas negras del juego de extensión y del orificio de alimentación. Empuje el juego de extensión con firmeza hacia abajo y trábelo en su lugar girando el conector EN SENTIDO HORARIO hasta que sienta cierta resistencia (aproximadamente ¾ de vuelta). NO gire el conector más allá del punto en que hace tope.


- Es importante mantener el juego de extensión trabado en su lugar durante la alimentación. Si desea conocer consejos y encontrar más información sobre cómo mantener el juego de extensión trabado, vaya a www.mic-key.com.



3

COMIENCE LA ALIMENTACIÓN ENTERAL

- Para alimentación por bolo, conecte una jeringa para bolo llenada con la solución alimenticia.
- Para alimentación continua, conecte un juego determinado a una bomba de alimentación con solución alimenticia en la bolsa.
- Si desea obtener detalles más específicos sobre la alimentación enteral, consulte la guía de uso y cuidado para pacientes del sistema MIC-KEY* G.

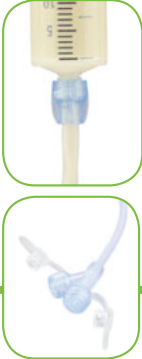

LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA SONDA MIC-KEY* G Y DEL ESTOMA

Limpieza y cuidado de la sonda MIC-KEY* G y del estoma

Limpie la piel que rodea su sonda de alimentación MIC-KEY* G diariamente usando:

- Jabón suave y agua
- Un paño suave sin pelusas



Consejos de seguridad

- Lávese siempre bien las manos con agua jabonosa tibia antes de tocar la sonda de alimentación.
- Evite pinchar o rasgar cualquier parte de la sonda o los juegos de extensión.

Cuidado de la sonda

Cuidadosamente, haga girar 360° la sonda de alimentación MIC-KEY* G, más ¼ de vuelta, antes de limpiarla para evitar que la sonda o el globo se adhieran a la piel.

Volumen de llenado según el tamaño de la sonda

Use agua estéril o destilada para llenar el globo. No llene el globo en exceso. Si lo hace, puede aumentar el riesgo de que el globo se dañe.

Volumen de llenado por tamaño	Volumen de llenado recomendado	Volumen de llenado máximo
12 Fr ml	3 ml	5 ml
14 Fr ml	5 ml	10 ml
16 Fr ml	5 ml	10 ml
18 Fr ml	5 ml	10 ml
20 Fr ml	5 ml	10 ml
24 Fr ml	5 ml	10 ml

USO DEL JUEGO DE EXTENSIÓN MIC-KEY* G DE HALYARD

Para conectarlo:

Introduzca el juego de extensión MIC-KEY* G en el orificio de alimentación MIC-KEY* G haciendo que coincidan las líneas negras del juego de extensión y del orificio de alimentación. Empuje el juego de extensión con firmeza hacia abajo y trábelo en su lugar girando el conector EN SENTIDO HORARIO hasta que sienta cierta resistencia.



Para desconectarlo:

Desconecte el juego de extensión de la sonda de alimentación MIC-KEY* G girándolo EN SENTIDO ANTIHORARIO hasta que la línea negra del orificio de alimentación se alinee con la línea negra del juego de extensión. Desconecte suavemente el juego de extensión y tape firmemente la sonda de alimentación MIC-KEY* G con la tapa del orificio de alimentación que se adjunta.



Se recomienda que solo conecte el juego de extensión MIC-KEY* G a la sonda de alimentación MIC-KEY* G.

Para evitar cualquier daño, no introduzca medicamentos ni fórmula alimenticia directamente en la válvula del orificio de alimentación.

- Juegos de extensión disponibles: para alimentación por bolo y alimentación continua
- Lave la sonda de alimentación y los juegos de extensión antes y después de cada uso para evitar obstrucciones.

Cambio de la sonda de alimentación MIC-KEY* G

Su profesional médico determinará cuándo es necesario cambiar la sonda de alimentación MIC-KEY* G. Consulte con su profesional médico si tiene alguno de los siguientes síntomas y pídale que revise la longitud de su estoma con el dispositivo de medición del estoma MIC-KEY* G:

- a. Aumento o pérdida de peso considerable
- b. La sonda "pellizca" o se siente tensa
- c. La sonda se siente demasiado floja
- d. El estoma causa molestia o está irritado
- e. La sonda no gira durante el mantenimiento habitual (se siente atascada o enterrada)

Distribuido por:

Nutricare
Salud integral

(506) 2241 3040 Nutricare www.nutricare.co.cr